

SALLES D'OBSTETRIQUE

Le taux de dilution normal d'une solution antiseptique de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** est de 1:250 ce qui équivaut 1¼ once par deux gallons d'eau, 40 ml pour 10 litres de solution. **Melrose Deamy ou Multi-Phen** n'exige aucun rinçage.

1. Utiliser **Melrose Deamy ou Multi-Phen** pour l'entretien général de tout le service d'obstétrique.
2. Laver à fond les planchers de la salle d'accouchement avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** après chaque accouchement.
3. Essuyer tous les jours avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** tous les appareils tels que les tables d'accouchement, les tables à instruments, les bassins, les supports et les lumières.
4. Nettoyer les instruments puis les faire tremper dans une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** pendant 15 minutes.
5. Essuyer les murs de la salle d'accouchement tous les 2 jours avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen**.
6. Passer une vadrouille trempée de solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** dans les salles de travail, les vestiaires et dans les corridors du service tous les jours ou plus souvent si nécessaire.
7. Essuyer avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** les lits, les chaises et autres appareils de la salle d'accouchement 2 fois par semaine.
8. Nettoyer une fois par semaine ou plus souvent si nécessaire les murs et les planchers des salles d'accouchement avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen**.
9. Essuyer les murs du service d'obstétrique autres que ceux de la salle d'accouchement avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** 1 fois par semaine.
10. Laver à la machine les planchers conducteurs une fois par semaine, (diluer à raison de 40 ml pour 10 litres de solution; utiliser une plus grande quantité si l'état de saleté l'exige). Rincer ensuite avec une solution normale de **Melrose Deamy ou Multi-Phen**.
11. Après chaque jour d'usage, nettoyer les vadrouilles utilisées pour **Melrose Deamy ou Multi-Phen** et ne pas les utiliser à d'autres fins.

Melrose Deamy ou Multi-Phen détruit le staphylocoque, le bacille de Koch, le pseudomonas, le champignons et la plupart des virus. De plus, il est efficace dans sa lutte contre les bactéries Gram positif et Gram négatif.