

## SALLES D'OPERATION

Le taux de dilution normal d'une solution antiseptique de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** est de 1:250 ce qui équivaut 1¼ once par deux gallons d'eau, 40 ml pour 10 litres de solution. **Melrose Deamy ou Multi-Phen** n'exige aucun rinçage.

1. En tout temps, utiliser **Melrose Deamy ou Multi-Phen** pour l'entretien général de tout le service de chirurgie, les appareils y compris.
2. **Appareils**, tels que tables d'opération, tables à instruments, bassins, supports et lumières: essuyer tous les jours ou plus souvent si nécessaire avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen**.

**Masques à anesthésie:** essuyer à l'aide d'une éponge de cellulose trempée de solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen**, rincer, laisser évaporer (ne pas essuyer). Attendre 3 heures avant d'utiliser à nouveau.

**Tubes endotrachéaux et tubes chédel:** laver avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** et faire tremper dans une solution analogue pendant 15 minutes puis laisser égoutter. Attendre 3 heures avant d'utiliser à nouveau. Faire tremper les pièces de caoutchouc dans une solution d'alcool à 70% pendant 1 minute.

**Appareils, tourniquets en caoutchouc, appareils à électrocardiogramme et à pression, appareils hypothermiques et tubes extracorporels:** nettoyer ou rincer à fond avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen**. Détacher les pièces démontables et les désinfecter séparément.

**Instruments de chirurgie:** nettoyer puis faire tremper dans une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** pendant 15 minutes puis rincer à l'eau stérile.

3. Nettoyer les planchers à fond avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** après chaque intervention.
4. Essuyer les murs de la salle d'opération une fois par semaine avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** à moins que les conditions n'exigent un nettoyage plus fréquent.
5. Le service de chirurgie doit être nettoyé à l'aide d'une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** 1 fois par semaine.
6. Laver à la machine les planchers conducteurs avec une solution de **Melrose Deamy ou Multi-Phen** 1 fois par semaine (diluer **Melrose Deamy ou Multi-Phen** à raison de 1¼ once par gallon d'eau ou 40 ml pour 10 litres d'eau; utiliser une plus grande quantité si l'état de saleté l'exige). Si possible, retirer la solution à l'aide d'un aspirateur puis rincer avec une solution normale de **Melrose Deamy ou Multi-Phen**.
7. Après chaque jour d'usage, nettoyer les vadrouilles utilisées pour **Melrose Deamy ou Multi-Phen** et ne pas les utiliser à d'autres fins.

**Melrose Deamy ou Multi-Phen** détruit le staphylocoque, le bacille de Koch, le pseudomonas, le champignons et la plupart des virus. De plus, il est efficace dans sa lutte contre les bactéries Gram positif et Gram négatif.